



ヘルスアシスト HA-4J 電池交換マニュアル

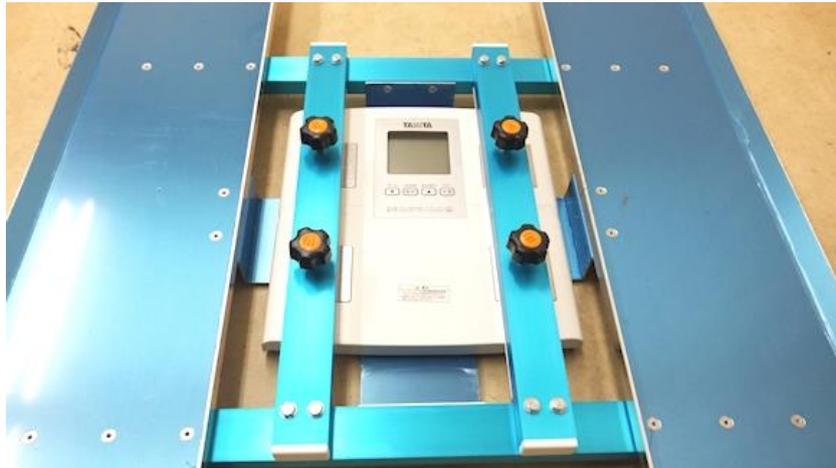

1. 付属のスパナを用意する。
※10 番を使用します。



2. 花型ノブ下のネジをスパナで緩めます。
※左回しで 1~2 回転ほど回します。

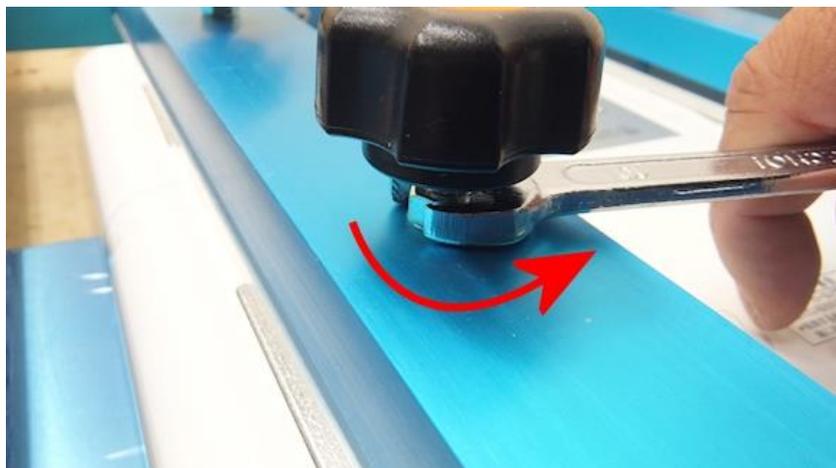


3. 花型ノブを 3~4 回転ほど緩めます。




4. フレーム端のボルトを緩めます。

※左回しで抜けるまで回します。

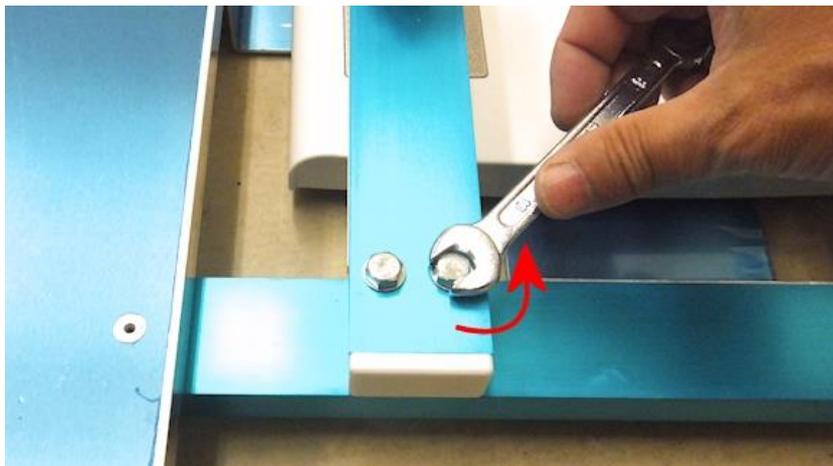

5. 外れたフレームとその下にあるスペーサーをレールに置いておきます。

※フレームのボルトは差したままにしておいてください。

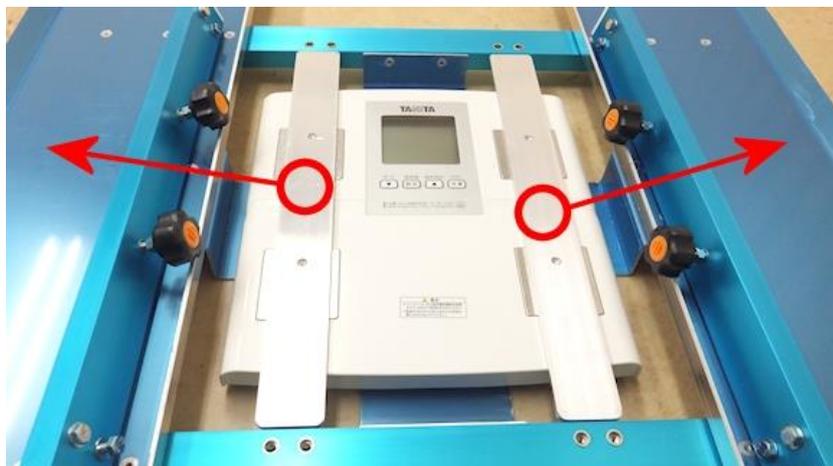

6. 外せるようになったヘルスマーターの電池を交換します。




7. 交換が済んだヘルスマーターを中心に置き、スペーサーをネジ穴の中央に合わせて置きます。




8. 逆の手順でまずフレームを乗せボルトでしっかりと固定します。


※右回し

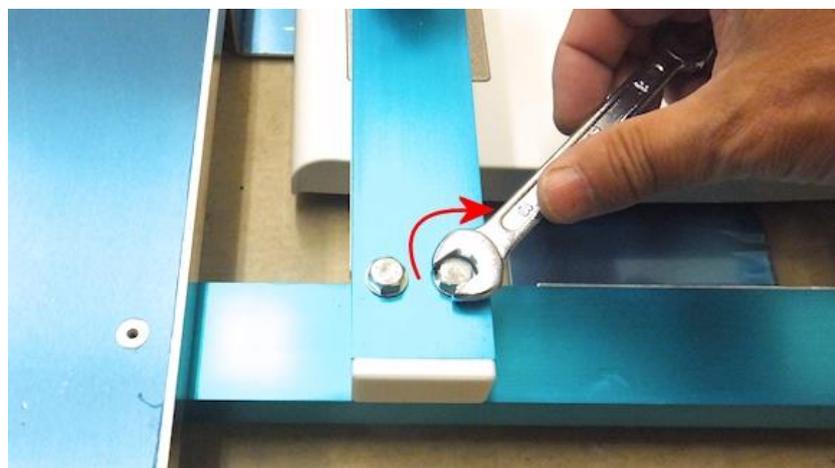

9. スパーサーのくぼみに合わせて花型ノブを軽く締めます。
※締め込み過ぎ厳禁です。

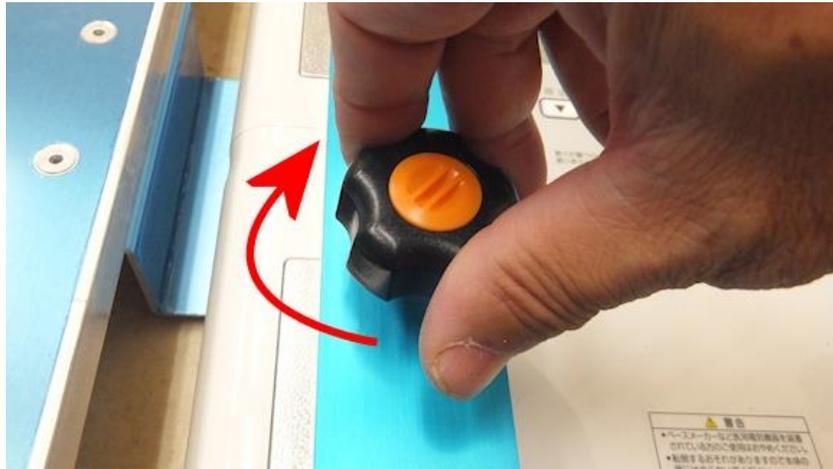

10. 花型ノブ下のネジをスパナで締めます。

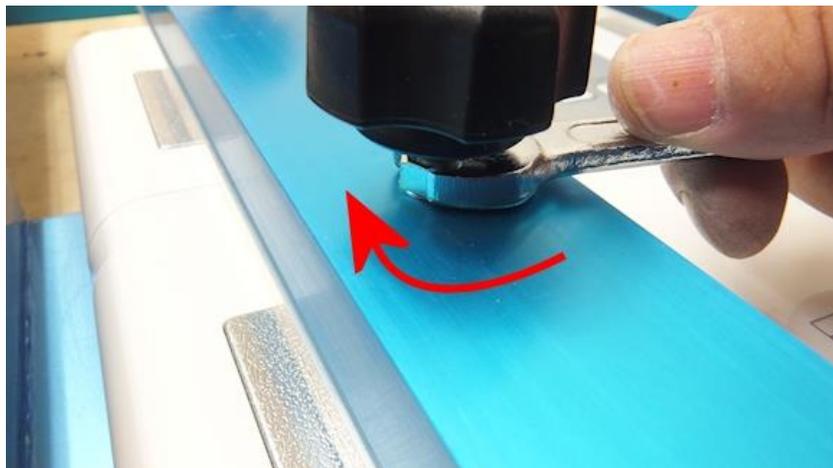

11. 完成です。

