


製品仕様

2本レール型 車いす用携帯スロープ (連結ベルト1セット付属)

品名		パラレル 50	パラレル 90 (スリムタイプ)	パラレル 90W (ワイドタイプ)	パラレル 120C
サイズ	全長	50cm	90cm		120cm
	レール幅	21cm	18cm	21cm	21cm
	側壁高さ	内 2.0cm/外 3.0cm	2.5cm	3.0cm	3.0cm
材質	本体	アルミ合金			炭素繊維強化 プラスチック(CFRP)
	裏面	炭素繊維強化プラスチック(CFRP)			
	滑り止め	合成ゴム			
	連結ベルト (付属品)	特殊 PVA 樹脂			
品名		約 2.2kg/セット	約 3.3kg/セット	約 3.9kg/セット	約 4.2kg/セット
耐荷量		300kg/2本セット (150kg/レール1本)	200kg/2本セット (100kg/レール1本)		300kg/2本セット (150kg/レール1本)
広げた時の総巾 (連結ベルト付の時)					
S : ベルト長 23cm		65.5cm	59.5cm	65.5cm	65.5cm
M : ベルト長 28cm		70.5cm	64.5cm	70.5cm	70.5cm
L : ベルト長 33cm		75.5cm	69.5cm	75.5cm	75.5cm
TAIS コード		01362-000003	01362-000001	01362-000002	01362-000004
希望小売価格 (消費税込) (本体価格)		51,840 円 (48,000 円)	64,800 円 (60,000 円)	70,200 円 (65,000 円)	118,800 円 (110,000 円)
交換用連結ベルト:別売		1,620 円 (消費税込)			

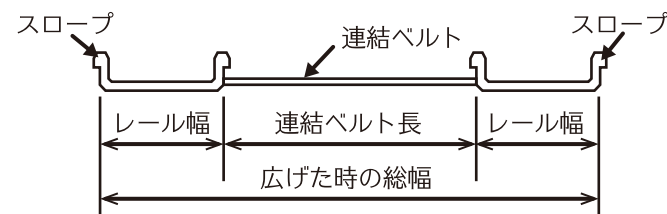

※車の荷台への車いす・バギーの積み下ろし運搬専用：パラキャリア
は別途専用カタログをご参照ください。(旧 パラレール 120L)

ご購入を希望される方は最寄りの販売店にお問合せください。
補助制度については地元の市区町村へご確認ください。

注意

製品を正しく安全にお使いいただくために、
ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

このカタログは製品の性能、品質の全てについてご説明するものではありません。
詳細につきましては当社または販売店までご相談下さい。
※このカタログの製品仕様及び内容は予告なく変更する場合があります。

DREAM NAVIGATOR
SINCE 1909



津田駒工業株式会社

コンポジット機械部 コンポジット販売・サービス・企画課
本社: 〒921-8650 石川県金沢市野町5丁目18番18号
TEL: 076-242-1116 FAX: 076-244-9459
E-mail: composite@tsudakoma.co.jp

販売店

C18ZVI01TJ



介護保険レンタル対象品 日本製

車いす用携帯スロープ パラレール



PARA RAIL 120C

フルカーボン製にて超軽量の約4kg!

30cm程度の段差に対応可能な120cm長さ
車に搭載し外出先へ持ち運べるデザイン



車いすアスリート奥村直彦さん
からの要望を製品化しました

PARA RAIL 90

自走車いすの方でも扱い易い!

90cm長さの小型で超軽量約3kg
車内に収まる超コンパクトサイズ
自走車いすの方でもワンタッチで設置が簡単



PARA RAIL 90W

介助者にも使い易いレール幅ワイド型!

90cm長さで持ち運び楽々!
安心のレール幅ワイド型
平面で足を踏み込めて車いすを押し上げやすい!
簡易電動車いすの方にもおすすめ



PARA RAIL 50

小段差に便利! 電動車いすの方にもおすすめ

車いすに搭載可能な超軽量約2kgの50cm長さ!
車いすに携帯し電車乗降時にもさっと出せる
電動車いすの方も外出先の小段差に

パラレールの特長

1) 2本レール型

- ・炭素繊維強化プラスチックを使用し軽量でコンパクト
- ・車いすユーザーが一人で扱いやすい
- ・車に収納し外出先へ持ち運べる
(パラレール 50 は車いすに収納・携帯できる)



2) 連結ベルト

- ・ご希望により付属の連結ベルトを付ければワンタッチで設置可能
- ＊脊椎損傷レベルで評価

3) 狭い間口に対応

- ・スロープ幅による間口寸法制限無し

4) カラーユニバーサルデザイン

- ・高齢の方でも使い易く、視認性のよいカラーデザインを採用
- ・持ち出したいくなるアクティブなデザイン



使用方法

① 運ぶ



② 設置する




③ 使用する




連結ベルト選択目安


- ・連結ベルトは **S,M,L** の3種類の長さがあり、車いすのサイズに応じて選択いただけます。
- ・右図を参考にご使用になる車いすの“**前輪の内-内間距離**”と“**後輪の外-外間距離**”を測り、「両方の寸法」が下表の範囲内となるベルトを選択してください。
- ・複数のベルトが選べる場合は、「両方の寸法」ともに範囲に余裕のあるベルトを選択ください。

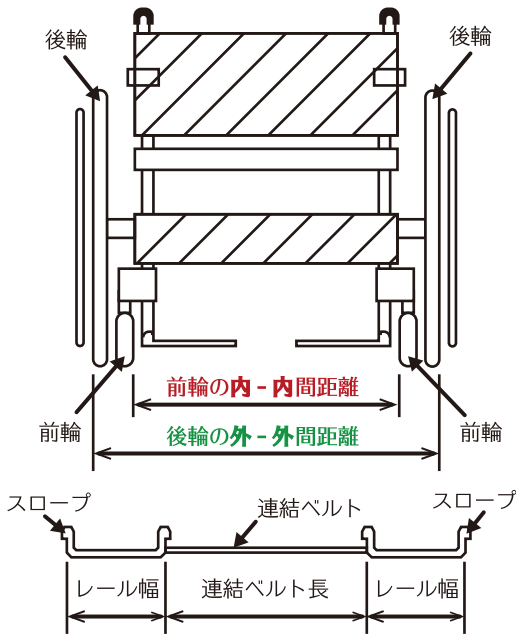

パラレール 50・パラレール 90W・
パラレール 120C の時

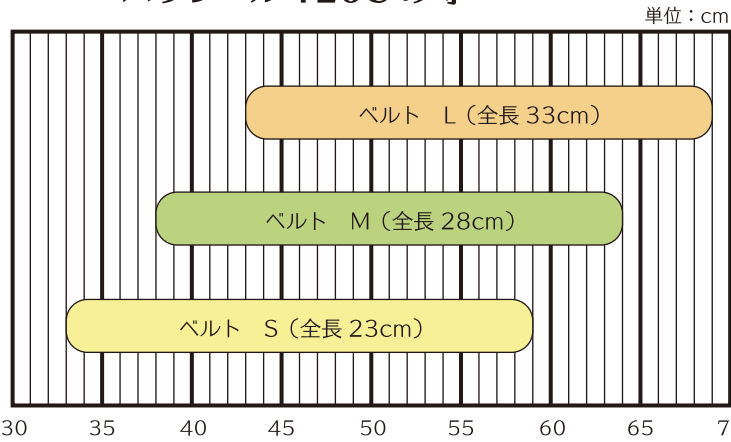


パラレール 90 の時

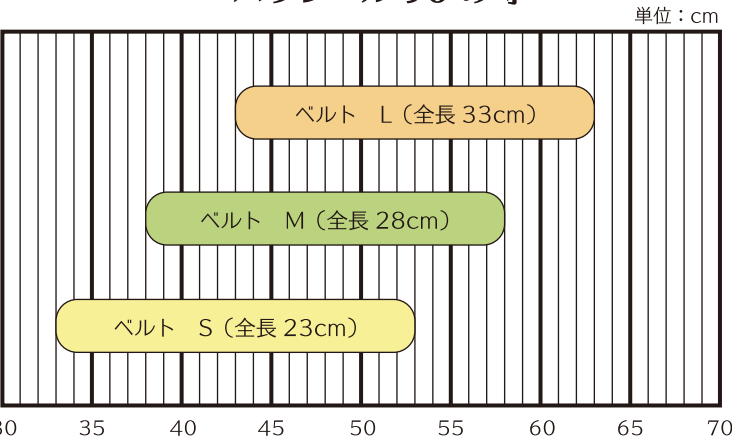

適用段差

適用段差は、車いすの種類やご利用者、介助者の体力などにより異なります。
適用段差の目安として、下記を参照してください。

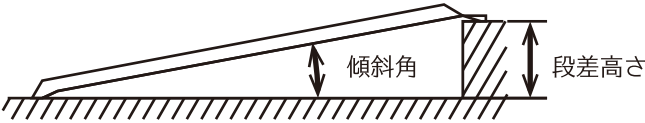

	適用段差の目安								
	パラレール 50			パラレール 90/90W			パラレール 120C		
	自力走行	介助者必要	最大段差	自力走行	介助者必要	最大段差	自力走行	介助者必要	最大段差
段差高さ	2～6cm	7～11cm	15cm	7～10cm	11～18cm	22cm	9～13cm	15～23cm	29cm
本スロープの長さ と段差の比較	約21～7倍	約6～4倍	約3倍	約12～19倍	約8～5倍	約4倍	約13～9倍	約8～5倍	約4倍
スロープの傾斜角度	約5°～10°	約11°～15°	約20°	約5°～7°	約8°～12°	約15°	約5°～7°	約8°～12°	約15°

車いす・バギーの運搬専用携帯スロープ パラキャリー

PARA CARRY

お母さんの声をカタチにしました！！

PARA RAIL 120L をリニューアル！

車の荷台にラクラク積み下ろし



家のちょっとした段差に便利



車に収納し外出先へ持ち運べる



軽量・コンパクトで持ち運びラクラク、ワンタッチで設置可能！
レール間に足を踏み込めるので、車いす・バギーを押し上げやすい！

使用方法



① 取り出す



② 広げる



③ 車の荷台・段差に設置



④ 車輪の位置を確認




⑤ 車いす・バギーをしっかりと
支えて押し上げる



⑥ レール間に足を入れて
車内へ

連結ベルト選択目安


- ・連結ベルトは **S,M,L** の 3 種類の長さがあり、車いす・バギーのサイズに応じて選択いただけます。
- ・下記寸法図を参考にご使用になる車いす・バギーの“**前輪の内 - 内間距離**”と“**後輪の外 - 外間距離**”を測り、「両方の寸法」が右表の範囲内となるベルトを選択してください。
- ・複数のベルトが選べる場合は、「両方の寸法」ともに範囲に余裕のあるベルトを選択ください。

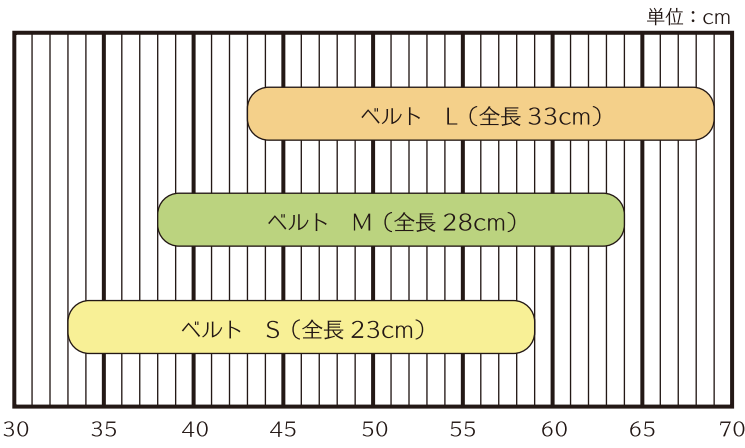

製品仕様（連結ベルト 1 セット付属）

品 名		パラキャリアー
サイズ	全長	1 2 0 cm
	レール幅	2 1 cm
	側壁高さ	3.0 cm
材質	本体	アルミ合金
	裏面	炭素繊維強化プラスチック (CFRP)
	滑り止め	合成ゴム
	連結ベルト (付属品)	特殊PVA樹脂
重量		約 4.1 kg / セット
耐荷量 (参考値)		80kg / 2本セット ※ 人は乗らないでください。
広げた時の総幅 (連結ベルト付の時)	6 5.5 cm (S : ベルト長 2 3 cm)	
	7 0.5 cm (M : ベルト長 2 8 cm)	
	7 5.5 cm (L : ベルト長 3 3 cm)	
TAISコード		0 1 3 6 2 - 0 0 0 0 0 5
希望小売価格【消費税込】 (本体価格)		7 4, 5 2 0 円 (6 9, 0 0 0 円)
交換用連結ベルト：別売		1, 6 2 0 円 【消費税込】

寸法図

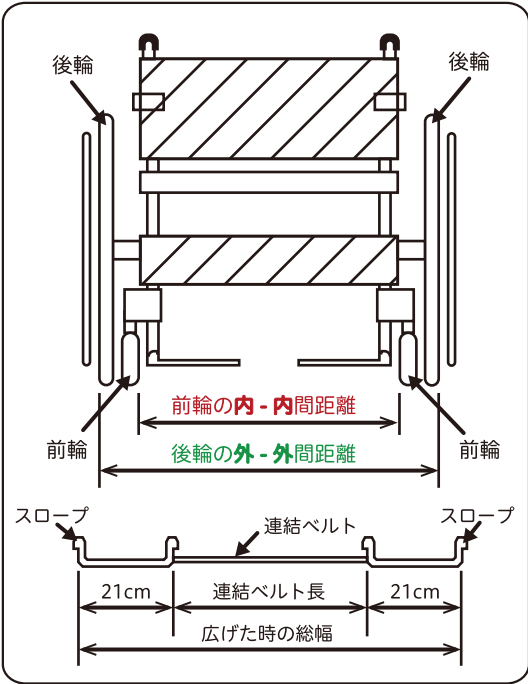

※ ご購入を希望される方は最寄りの販売店にお問合せください。補助制度については地元の市区町村へご確認ください。



注 意

車いすやバギーに人を乗せた状態で使用しないで下さい。

普通電動車いすには使用できません。

製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

このカタログは製品の性能、品質の全てについてご説明するものではありません。
詳細につきましては当社または販売店までご相談下さい。
※このカタログの製品仕様及び内容は予告なく変更する場合があります。

DREAM NAVIGATOR
SINCE 1909

TSUDAKOMA

津田駒工業株式会社

コンポジット機械部 コンポジット販売・サービス・企画課

本社: 〒921-8650 石川県金沢市野町5丁目18番18号
TEL: 076-242-1116 FAX: 076-244-9459
E-mail: composite@tsudakoma.co.jp

販売店